

Notice d'utilisation

CHARIOT DE VISITE

Français



IBUISARD
Distribution

REF: 733405 / RELEVABLE
REF: 733406 / PLIABLE



CHARIOT DE VISITE

Ces instructions ont été établies pour votre sécurité.

Lisez-les attentivement avant d'utiliser Chariot de visite et conservez-les pour référence.

INTRODUCTION

Attention: Tous les utilisateurs doivent lire soigneusement les instructions de mise en service avant la première utilisation, afin d'être familiarisés avec le produit et de l'utiliser au maximum de ses capacités.

Les instructions de montage contiennent des informations importantes sur la manière, d'utiliser le produit d'une manière sûre et efficace.

Se conformer à ces instructions permet d'éviter les dangers, de réduire les coûts et d'augmenter la fiabilité et la durée de vie du produit. Le manuel d'instructions doit toujours être disponible sur le lieu d'utilisation de l'appareil.

En complément des instructions de mise en service et des réglementations relatives à la prévention des accidents, il faut tenir compte des règles en vigueur en matière de sécurité du travail dans chaque pays d'utilisation.

Il est recommandé d'utiliser une paire de gants de sécurité ainsi que des chaussures de sécurité, un casque et des lunettes durant le travail avec le chariot de visite.



Modèle : 733405

Poids net / Poids Brut(kg):7.2/8.2

Dimensions (mm):1020x425x110

Dimensions Package (mm):1040x440x125



Modèle : 733406

Poids net / Poids Brut(kg):6.2/7.1

Dimensions (mm):460x155x480

Dimensions Package (mm):901x425x120





ATTENTION

Cet appareil est conçu pour être replié en forme de « U » pour le rangement et stockage ou déplié lorsqu'il est utilisé en tant que chariot de visite. Il est destiné à être utilisé pour soutenir et déplacer, sur des surfaces régulières et planes, une charge nominale correspondant à une seule personne, dont le poids est inférieur ou égal à *100 kg, dans le but de réaliser des opérations de maintenance ou des prestations de service dans le domaine de l'automobile.

Cet appareil n'est pas destiné ou conçu pour être utilisé à d'autres fins.

* Capacité de charge nominale : une (1) personne pesant 100 kg au maximum ; cela inclut la personne elle-même, les outils, le matériel et les effets personnels.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Cet appareil ne nécessite que peu d'entretien. Nettoyez lorsque nécessaire. Au besoin, utilisez un agent nettoyant doux (non caustique) pour nettoyer le siège.

Ne jamais lubrifier les roulettes

Résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou le paquet indique que l'élimination du périphérique après son cycle de vie pourrait Nuire à l'environnement. Ne pas jeter l'appareil (ou les piles) en tant que déchets municipaux non triés; cela devrait Être conduit à une entreprise spécialisée pour le recyclage. Cet appareil doit être retourné à votre distributeur ou à un service local de recyclage. Respectez les règles environnementales locales. Si Dans le doute, contactez vos autorités locales d'élimination des déchets.!

Veuillez lire attentivement le manuel avant de mettre cet appareil en service. Si la l'appareil a été endommagé contactez votre revendeur



Gardez cet appareil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.



L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec une réduction de la sensibilité physique, sensorielle ou les capacités mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsables de leur sécurité.

- ✓ Familiarisez-vous avec les fonctions de l'appareil avant de l'utiliser.
- ✓ Toutes les modifications de l'appareil sont interdites pour des raisons de sécurité.
Les dommages causés par les modifications apportées par l'utilisateur au périphérique ne sont pas couverts par la garantie.
- ✓ Utilisez uniquement l'appareil dans le but prévu.

L'utilisation de l'appareil de manière non autorisée annulera le garantie.

- ✓ Les dommages causés par le non-respect de certaines directives de ce manuel ne sont pas couverts par la garantie et le distributeur ne sera pas responsable de tout vice ou problème qui en résulte.
- ✓ Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Entretien et Maintenance

1. Essuyez les appuis-tête avec un chiffon humide.
2. Nettoyez la graisse ou les débris qui se sont accumulés sur les roulettes.
3. Vérifiez la quincaillerie et resserrez-la au besoin.

Assemblage

1. Fixer les roulettes sur la ou les bases du cadre avant et arrière.
2. Faites glisser la base du cadre arrière dans la base du cadre avant.
3. Fixer l'assise sur le cadre à l'aide des vis de fixation fournies



Avertissements de sécurité



! Avertissement : Lorsque vous utilisez le chariot de visite , vous devez toujours prendre certaines précautions de base afin de réduire le risque de blessure et de dommage à l'équipement. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit!

1. Ne le placez pas sous les pneus d'une automobile pour déplacer ou repositionner le véhicule.
2. Ne dépassez pas la capacité nominale (100 kg).
3. Ne l'utilisez pas comme un jouet ou une planche à roulettes.
4. Ne vous tenez pas debout dessus et ne l'utilisez pas comme marchepied.
5. Ne l'utilisez pas si une ou plusieurs roues ne fonctionnent pas. Réparez-le avant de le réutiliser.
6. Ne l'utilisez pas si l'une des pièces de la structure de support est cassée, coupée ou fendue.
7. Lorsqu'il n'est pas utilisé, chariot de visite doit être rangé dans un endroit sûr.
8. Gardez-le hors de la portée des enfants.
9. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels




1. Si vous levez le véhicule pour travailler dessous, placez celui-ci sur des chandelles. Ne travaillez pas sous un véhicule soutenu par un cric. Si le véhicule est au sol, bloquez les pneus, serrez le frein à main et passez une vitesse ou passez en plage stationnement.
2. Gardez la tête posée à plat sur l'appui-tête au moment où vous glissez sous le véhicule.
3. Gardez la tête posée à plat sur l'appui-tête quand vous faites sortir le chariot de visite

Assemblage

1. Fixer les roulettes sur la ou les bases du cadre avant et arrière.
2. Faites glisser la base du cadre arrière dans la base du cadre avant.
3. Fixer l'assise sur le cadre à l'aide des vis de fixation fournies

Exemple de montage

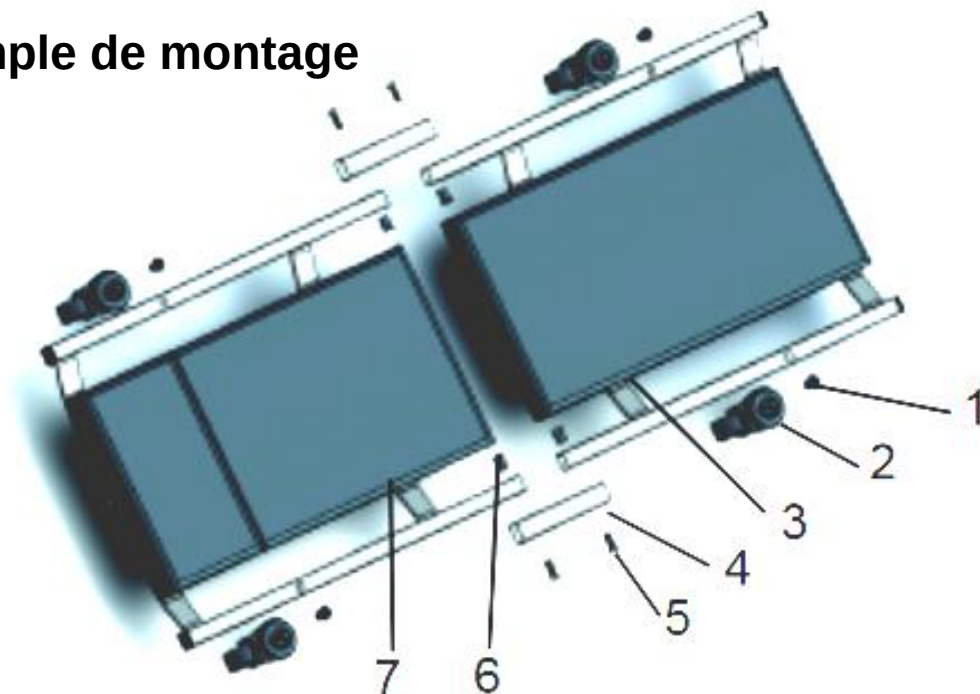

N°	Description	Qté
1	Écrou manchon	4
2	Roulette	4
3	Structure inférieure	1
4	Tube	2
5	Boulon	4
6	Écrou	4
7	Structure supérieure	1



Attestation de déclaration de conformité CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Model No.: **Réf. 733405**

Année de fabrication: 2019

Fonction : **CHARIOT DE VISITE**

Désignation : **CHARIOT DE VISITE**

Est conforme aux dispositions de la directive machine
(directive 2006/42/EC modifiée)

et aux réglementations nationales la transposant Est Conforme aux
dispositions des normes harmonisées suivantes:

EN1494/A1:2008

Fabriqué en Chine





Attestation de déclaration de conformité CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Model No.: **Réf. 733406**

Fonction : **CHARIOT DE VISITE**

Désignation : **CHARIOT DE VISITE**

Est conforme aux dispositions de la directive machine
(directive 2006/42/EC modifiée)

et aux réglementations nationales la transposant Est Conforme
aux dispositions des normes harmonisées suivantes:

EN1494/A1:2008

Fabriqué en Chine

